

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Gebrauchsanweisung zu deinen Kondomen

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor dem Benutzen des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre aus der Verpackung auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch enthält.

Anwendung

Das Kondom ist zur Verwendung während des vaginalen Geschlechtsverkehrs vorgesehen.

Die Kondomeinzelpackung auf Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich beschädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung verwenden.

Das Kondom schon vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden. Das Kondomspitze mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den erigierten Penis setzen und über den gesamten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man spürt, dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten.

Den Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Weise herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen.

Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Nie zusammen mit öl- und fetthaltigen Gleitmitteln oder Scheidenzäpfchen verwenden. Bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kontakt mit dem Kondom kommen können, ist ein Arzt oder Apotheker zur deren Verträglichkeit mit Kondomen zu befragen.

Bei Produktmängel vor der Anwendung wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird: Deutschland: info@eis.de | Österreich info@eis.at
Medizinische Hilfe ist möglichst schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, oder sollten Unverträglichkeiten auftreten.


Spezifikationen 503743DR AMOR Kondome 3 x15er-Packung

Inhalt (Stück): 45

Material: Naturkautschuklatex

Medizinprodukt: Klasse IIb

geprüft nach ISO 4074

CE-Kennzeichnung:  0197

Länge in mm	nominale Breite	Wandstärke in mm	Farbe	Struktur	Form	Geruch
18x 180	53 ±2	0,060-0,077	natur	glatt	zylindrisch	neutral
3x 180	52 ±2	0,060-0,077	natur	genoppt	zylindrisch	neutral
3x 180	54 ±2	0,060-0,077	natur	gerippt-genoppt	anatomisch	neutral
3x 180	53 ±2	0,060-0,077	rot	glatt	zylindrisch	Erdbeere
3x 180	52 ±2	0,060-0,077	natur	gerippt	zylindrisch	neutral
3x 180	53 ±2	0,060-0,077	rose	glatt	zylindrisch	Orange
3x 180	53 ±2	0,060-0,077	grün	glatt	zylindrisch	Spearmint
3x 180	53 ±2	0,060-0,077	gelb	glatt	zylindrisch	Banane
3x 180	53 ±2	0,060-0,077	schwarz	glatt	zylindrisch	Schokolade
3x 180	53 ±2	0,060-0,077	blau	glatt	zylindrisch	Tutti-Frutti

Hersteller: AMOR Gummiwaren GmbH, August-Rost-Str.4 99310 Arnstadt | GERMANY

Vertrieb: Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3 33609 Bielefeld | GERMANY

 Gebrauchsanweisung beachten	 Hersteller	 verwendbar bis	 von Sonnenlicht fernhalten	 Medizinprodukt
 bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	 trocken aufbewahren	 Artikelnummer	 Charge	